

# BULA SANOVIE®

## Spycra® Contact

Curativo de Silicone



## INSTRUÇÕES DE USO

### DESCRIÇÃO

**CURATIVO SPYCRA® CONTACT**, curativo de silicone com um lado auto adesivo, elástico. Não absorvente.

### INDICAÇÕES

Como Interface para ser usado em feridas com médio para alto grau de exsudação tais como abrasões, incisões cirúrgicas, queimaduras de espessura parcial, transplantes, úlceras diabéticas, úlceras venosas e arteriais, úlceras por pressão; Skin Tears com ou sem perda de tecido; Epidermólise bolhosa (EB); Associado ao tratamento de feridas por pressão negativa.

### CARACTERÍSTICAS

- Um lado auto aderente;
- Flexível e elástico;
- Seu alto percentual de poros abertos promove rápida migração vertical do excesso de fluido para o curativo secundário;
- Rápida e fácil aplicação;
- Não adere ao curativo secundário;
- O curativo pode ser reposicionado permitindo controle fácil e seguro da ferida durante o processo de cicatrização;
- Sem resíduo de adesivo na pele após a remoção do curativo;
- Ausência de dor e trauma/lesões secundárias da pele (perda de tecido) ao trocar o curativo.

### INSTRUÇÕES DE USO

1. Limpe o ferimento cuidadosamente, se necessário secar a pele circundante.
2. Escolha o tamanho do curativo que abrange a ferida e a pele circundante de pelo menos 2 cm.
3. O **CURATIVO SPYCRA® CONTACT** pode ser cortado, se necessário, antes de remover as películas protetoras. É preferível utilizar um tamanho maior em vez de vários curativos menores sobrepostos; não assegura uma boa aderência quando sobrepostos.
3. Abra a embalagem estéril no local indicado e retire o curativo.
4. Dobre o curativo na linha de corte da película protetora levantando as bordas internas cuidadosamente.
5. Remova parcialmente a película protetora do centro para a borda em ambos os lados do curativo, posicionando a parte adesiva do curativo sobre o local a ser aplicado. Certifique-se de que cerca de 1 a 2 cm da película protetora ainda o protege antes de ser aplicado sobre a ferida ou a pele frágil.
6. Uma vez posicionado sobre a ferida remova totalmente a película protetora alisando delicadamente a superfície do curativo inclusive sobre a pele circundante, garantindo uma boa vedação.
7. Aplique o curativo de uma forma normal, livre de tensões. Se necessário, pode ser removido e reposicionado.

8. **CURATIVO SPYCRA® CONTACT** pode ser deixado no local por vários dias, dependendo da condição do ferimento (o exsudato deve passar livremente através do curativo e os poros não devem ser bloqueados). Se saturado, o curativo secundário absorvente externo deve ser trocado e o **CURATIVO SPYCRA® CONTACT** mantido no local.

**Nota:** Em caso de feridas exsudativas, recomenda-se a aplicação de um curativo absorvente secundário. O uso de soluções hidratantes tais como; géis, óleos, cremes de barreira, dentre outros, comprometem a adesividade do curativo. Quando do uso de soluções hidratantes, é recomendável que: -aguarde ate que o local a ser aplicado -o curativo esteja completamente seco.

### ADVERTÊNCIAS

Não utilizar caso a embalagem se apresente danificada ou com sinais de violação. Armazenar em local limpo, seco e fresco, ao abrigo do sol.  
**NÃO REPROCESSAR.**  
Uso único – Destruir após o uso.

### TAMANHOS DISPONÍVEIS SPYCRA® CONTACT

- 5 cm x 7,5 cm Caixa 10 un.
- 7,5 cm x 10 cm Caixa 10 un.
- 10 cm x 18 cm Caixa 05 un.
- 18 cm x 30 cm Caixa 03 un.

### FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:

Reskin Medical N.V.  
Ravenshout Z 5.2.50  
3980 Tessenderlo  
België/Belgique/Bélgica  
Tel: 00 32 (0)13 67 13 67  
Fax: 00 32 (0)13 67 13 68  
www.reskin.eu

### IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:

Sanovie International Trade Eireli Ltda. EPP  
R. Rockefeller, 973, Bairro Rebouças  
CEP: 80230-130  
Curitiba – Paraná – Brasil  
CNPJ 07.167.191/0001-20

### ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

FONE - (0xx) (41) 3015 2697  
www.sanovie.com.br  
Resp. Técnico - Anna Paula Araújo de Carvalho  
Coren - PR 276-956  
Nº DE CADASTRO ANVISA: 8.03011.3  
Marcelo A. Lima Silva - Representante Legal  
Anna Paula A. de Carvalho – Resp. Técnico



Reskin Medical NV, Ravenshout Z 5.2.50, B-3980 Tessenderlo, Belgium  
T: +32 (0)13 67 13 67, F: +32 (0)13 67 13 68



Made in Belgium



0120

STERILE EO  
MADE IN EU

issued 2016-06