



Eclypse® Adherent Sacral

Curativo super absorvente Sacral com camada de contato em silicone macio


Descrição do produto

Eclypse Aderente Sacral é um curativo super absorvente para área sacral, com alta capacidade de controle do exsudato, com uma camada de contato em silicone macio Silfix.

Eclypse Aderente sacral irá aderir somente na pele seca no entorno da ferida e pode ser facilmente retirado para ajustar, sem perda de suas propriedades aderentes.

Uso

Coloque o curativo Eclypse Aderente Sacral com a face branca voltada para a superfície da ferida, com a camada bege voltada para cima, deixando uma sobra de no mínimo 2cm além das bordas no entorno da ferida. O curativo deve ser torcido antes de saturar sua capacidade, mas o tempo de uso/troca vai depender do nível de exsudato, podendo ficar no local por até 7 dias.

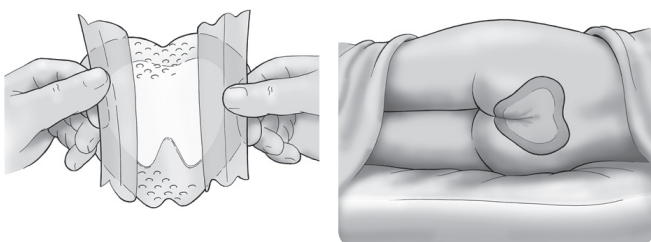

Tamanhos disponíveis

Código	Tamanho
CR3985	17cm x 19cm
CR3986	22cm x 23cm

Todos os tamanhos em embalagem com 10 unidades

Características

Curativo com tecnologia atraumática;
Alta capacidade de controle do exsudato;
Camada externa transpirável e repelente a fluídos;
Ambiente de cicatrização da ferida úmido;
Sistema de bloqueio de umidade.

Indicações

Todas feridas com exsudação na área sacral, por exemplo: úlcera por pressão.

Contra Indicações

Não usar em sangramentos arteriais ou feridas com sangramento intenso.

Não corte o curativo Eclypse Adherente Sacral.

Dica

Aplique o curativo em dois estágios: dobre o curativo ao meio de modo a formar um vinco, assegure que a primeira metade do curativo esteja colada a pele, antes da segunda metade do curativo ser exposta, então remova o revestimento protetor da segunda metade e fixe-a repetindo a mesma operação executada com a primeira metade a fim de garantir uma boa fixação. Este método de aplicação reduz o risco de dobras e enrugamentos indesejados no curativo.

Eclypse Adherent Sacral tem o formato ideal para também ser aplicado sobre os quadris, sob os braços (axilas) ou região dos seios, tal como na área sacral.

Anvisa 80301130016

SANOVIE®

+55 41 3015-2697 | +55 41 3016-3134
Curitiba, Paraná Brasil
sanovie.com.br



Advancis
Medical

SANOVIE®