

NeoShades® com alças Proteção

PARA OS OLHOS EM SESSÕES DE FOTOTERAPIA



N724



N725



N726



— CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS —

- Material de proteção ocular macio e acolchoado com um design bonito de óculos de sol
- Bolsos oculares criados para o conforto e segurança do paciente (N724, N725, N726)
- As guias de hidrocolóide NeoBond®, que não agredem a pele, mantêm os NeoShades no lugar
- Não fabricado com látex de borracha natural ou plastificante DEHP
- Embalado individualmente

Cat. #	Item	Unidade de quantidade
N720	Micro	50/caixa
N721	Pequena	50/caixa
N722	Grande	50/caixa
Com bolsos oculares		
N724	Micro	50/caixa
N725	Pequena	50/caixa
N726	Grande	50/caixa

Patente dos EUA #8,070,288;
Patentes adicionais pendentes

NeoShades® com alças Proteção

PARA OS OLHOS EM SESSÕES DE FOTOTERAPIA

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Os NeoShades são indicados para usar como proteção para os olhos durante as sessões de fototerapia. Concebidos para utilização em pacientes pediátricos (recém-nascidos, bebês e crianças).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparação

- 1 Selecione o tamanho certo.
- 2 Limpe e seque a pele, segundo o protocolo hospitalar.

Nota: É importante assegurar que a pele esteja o mais limpa e seca possível. As alças não aderem devidamente a pele ou cabelo húmidos. A presença de óleos e loções afeta adversamente a aderência.

NÃO UTILIZAR ÁLCOOL.

Aplicação


- 1 Antes de remover o invólucro, retire cuidadosamente as alças dos NeoShades e agite-as nas mãos por 60 segundos. Também pode aquecer sob fonte de calor por radiação ou bolsa térmica, durante 10 a 15 segundos.
- 2 Retire e descarte a película de proteção. Posicione as alças sobre a pele e mantenha-as no sítio durante 60 segundos, para garantir a devida aderência.
- 3 Cubra os olhos com os NeoShades e prenda suavemente as alças.

Nota: Deixe uma parte das alças exposta para facilitar a remoção.



Remoção

- 1 Substitua o NeoShades com alças a cada 5 dias ou segundo o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro.
 - 2 Segure a extremidade da alça no lugar e lentamente separe os NeoShades das alças.
 - 3 Sature a alça com água ou soro fisiológico.
 - 4 Descole lentamente a alça da pele com a ajuda de uma compressa embebida em água ou soro fisiológico.
- Repita no lado oposto.

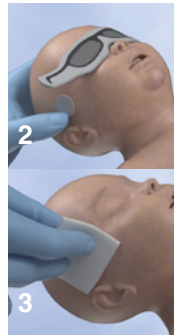

CONTRA-INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES

E ADVERTÊNCIAS

Os NeoShades com Alças são contraindicados para pacientes com deformação facial, infecções de pele ou áreas de pele escoriadas que impediriam o correto posicionamento das mesmas. Não se destinam a ser usados em adultos.

Segundo a legislação em vigor, a venda deste dispositivo está sujeita a receita ou indicação médica.

Os NeoShades só devem ser usados em pacientes sob supervisão contínua e direta de profissionais de saúde.

As alças devem sempre ser removidas quando os NeoShades forem retirados do paciente. Não reutilizar.

Descontinuar imediatamente a utilização em caso de irritação cutânea.

Utilizar apenas num único paciente.

Aplicam-se práticas gerais de transporte e armazenamento.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2021 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague
The Netherlands



PPE Regulation (EU) 2016/425
Notified Body: BSI Group (2797),
Say Building, John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam, Netherlands

M692 Rev A