

SANOVIE®

Neo Guard

Protetor CPAP nasal para neonatos



Proteção e cuidado

Neo Guard

Protetor CPAP Nasal para neonatos



Descrição do produto

PROTETOR CPAP NASAL – Neo Guard, estabiliza a cânula de CPAP uma vez que a mesma não fica em contato direto com a pele do bebê.

Uso

A finalidade é prevenir o contato direto da cânula de CPAP Nasal com o nariz do bebê, evitando danos ao septo nasal e irritação da mucosa nasal. Coloque cuidadosamente posicionando os orifícios do protetor, alinhados com os orifícios nasais do bebê. Caso seja necessário, pode remover e reposicionar.

Características

Protege e evita irritação ou danos a mucosa e ao septo nasal do neonato;

Estabiliza o CPAP;

Cola adesiva hidrocolóide para fixação, hipoalérgica;

Compatível com quase todas as marcas de CPAP para neonatos;


Disponível em quatro tamanhos;

Indicações

NEO GUARD é indicado para uso associado à cânula de CPAP (Pronga) Nasal, em paciente neonato com peso abaixo de 700gramas (0,7Kg) até 3000gramas (3,0kg).

O tempo de permanência na pele do bebê: fabricante preconiza troca a cada 7 dias, ou/e a critério do protocolo do serviço da instituição, conforme entendimento da junta técnica especializada.

Tamanhos disponíveis

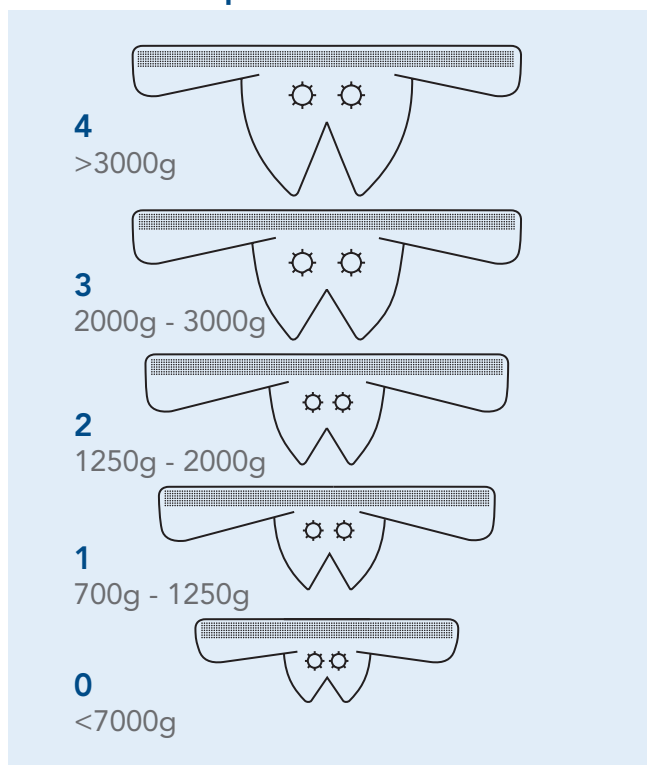

Código	Tamanho	Unid/Caixa
NG000	0	50
NG001	1	50
NG002	2	50
NG003	3	50
NG004	4	50

Anvisa 80301130030

SANOVIE®

+55 41 3015-2697

Curitiba, Paraná Brasil

sanovie.com.br



Made in Australia

