


Instruções de Uso Neo Guard

Protetor CPAP Nasal para neonatos




1.Assegure que a área no entorno do nariz do bebê esteja completamente limpa e seca, lave gentilmente com água. Isso ajudará na adesão do Neo Guard.

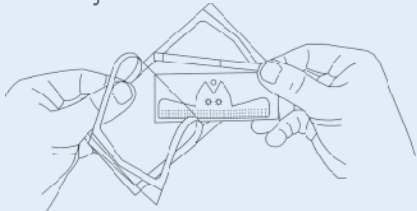

2.Remova cuidadosamente o Neo Guard do blister, evitando esticar o esticar o hidrocolóide.



3.Dobre as partes superior e inferior para garantir que os prés cortes sejam separados.

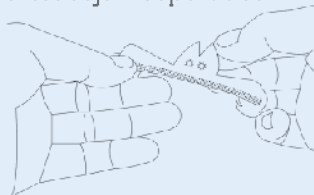


4.Coloque o Neo Guard sobre o nariz do bebê de modo que os buracos fiquem alinhados com as narinas.




5.Suavemente alise as pétalas do Neo Guard sobre cada lado do nariz, assegurando-se que não haja vínculos ou protuberâncias que possam causar uma área de pressão.



6.Enrole o velcro ao tubo do CPAP para garantir adesão ao Neo Guard.

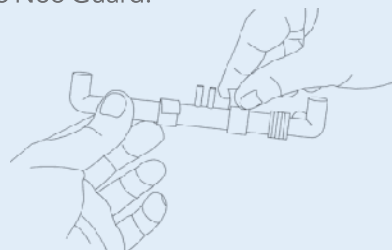

7.Insira com cuidado os pinos do CPAP nos orifícios do Neo Guard.

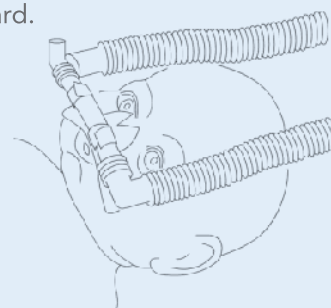

Nota

O tamanho dos furos no Neo Guard podem parecer menores do que o necessário para a passagem dos pinos do CPAP, no entanto os furos têm um desenho que permite que o hidrocolóide elástico se expanda ao introduzir a pronga, em seguida retornará a dimensão original e manterá os pinos do CPAP corretamente posicionados, garantindo que fiquem presos ao Neo Guard, de modo a evitar vazamento e manter a pressão positiva.

Utilize a tabela abaixo para selecionar o tamanho do Neo Guard, de acordo com o peso aproximado do paciente

Peso aprox. do bebê	Tamanho Neo Guard
< 700g	0
700g to 1250g	1
1250g to 2000g	2
2000g to 3000g	3
>3000g	4

Dicas Úteis

O Neo Guard vêm com duas faixas de Velcro, que podem ser usadas para ajudar na fixação da pronga do CPAP ao Neo Guard. Envolve o tubo em cada lado da pronga e fixe na área "cartilhada" (superfície áspera) do Neo Guard.

Aqueça o Neo Guard antes de aplicá-lo. Deixe dentro da incubadora por um curto período de tempo.

Não se deve esticar o hidrocolóide do Neo Guard. Este material tende a retornar a sua dimensão original, logo ao esticá-lo sobre a pele do bebê, o Neo Guard soltará.

SANOVIE®

+55 41 3015-2697

Curitiba, Paraná Brasil
sanovie.com.br



Made in Australia

